



trèswhite™
by Opalescence®



trèswhite™
by Opalescence®



Conoscete Opalescence.

Sapete che il nostro gel è sempre stato appiccicoso. Conoscete la nostra piccola ossessione di realizzare la miglior mascherina applicativa possibile: materiale sottile, riserve, margini festonati. Riuscite a immaginare le possibilità che si aprirebbero se potessimo combinare il nostro gel, vincitore di innumerevoli riconoscimenti, con le nostre innovazioni nelle mascherine? Non dovete. Presentiamo trèwhite, il passo successivo nello sbiancamento dentale professionale.

très oooh!

Chi poteva pensare a ulteriori miglioramenti dello sbiancante giudicato numero uno? Quali caratteristiche della linea di prodotti, che da 13 anni rappresenta lo standard nello sbiancamento dentale, potevano essere migliorate per offrirvi un'altra grande innovazione? Dopo averne parlato con voi e averci pensato e ragionato attentamente, abbiamo stabilito che volevamo un prodotto che fosse:

- **Più facile** per pazienti e professionisti
- **Più forte** nelle concentrazioni (perossido d'idrogeno al 9%)
- **Più breve** nei tempi (30 – 60 minuti, una volta al giorno)
- **Più rapido** nei risultati (5-10 giorni)
- **Migliore** nel gusto degli aromi (disponibili menta o melon)


très semplice

Cosa rende trèswhite così speciale? Bèh...

- Nessuna impronta
- Nessun modello
- Nessun lavoro di laboratorio

Vi abbiamo incuriosito? Forse allora vi piacerà anche il fatto che trèswhite è pronto all'uso. Non c'è alcun tempo di preparazione, né per voi né per il paziente. Come?

- Mascherine sottili che si adattano confortevolmente a qualunque sorriso, costituite da una membrana precaricata elegantemente inserita in una mascherina applicativa morbida e colorata.
- Agevole posizionamento sui denti per un adattamento personalizzato (da primo molare a primo molare) su entrambe le arcate.

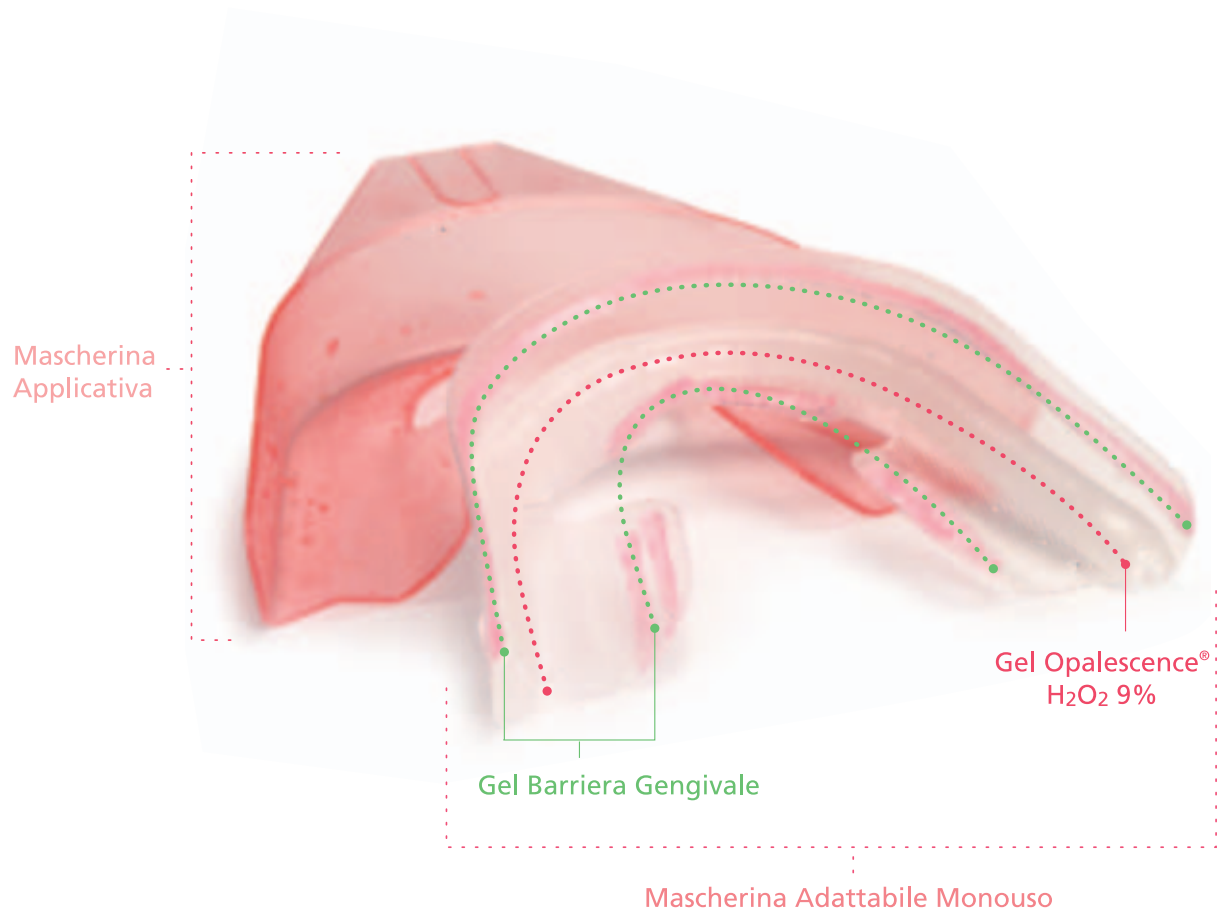


très brillante

A questo punto sapete che questo è un prodotto facile. Ma lo sapevate che è rapido, che il gusto è buono e che è brillante?

Davvero, trèswhite è precaricato con due gel distinti:

- 1 un gel sbiancanti per schiarire i denti
- 2 un gel barriera (lungo il margine gengivale per la protezione dei tessuti molli)

I due gel agiscono sinergicamente per fornire il processo di sbiancamento più innovativo, efficace e sicuro. Ora, il vostro sistema di sbiancamento è in grado di fare questo?

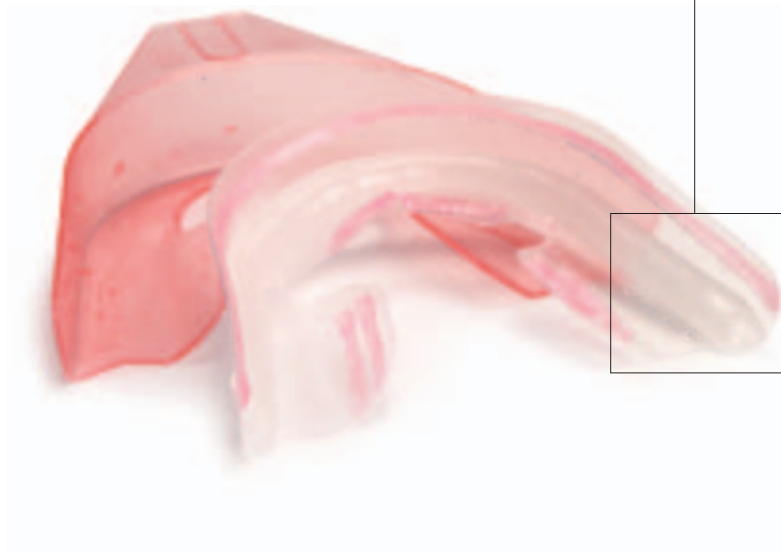


très invisible


La mascherina trèswhite è così sottile, trasparente e flessibile, da poter essere indossata in qualunque posto e momento, senza essere notata.




Togliere dalla confezione

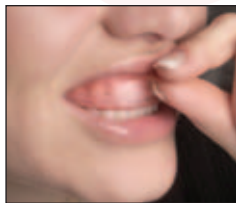


Centrare la mascherina sull'arcata

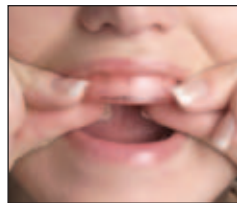


Premere delicatamente in posizione

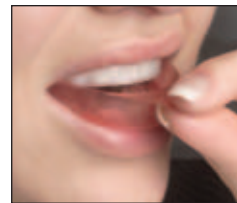

Togliere la mascherina esterna

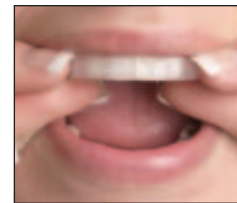

Regolare delicatamente la mascherina interna

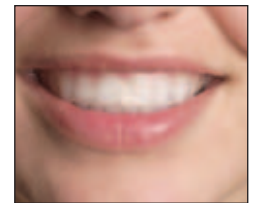

Indossare da 30 a 60 minuti

Informazioni per l'ordinazione sul retro

trèwhite informazioni per l'ordinazione www.ilic.it

Patient Kit
contiene
10 - Mascherine Superiori
10 - Mascherine Inferiori
in confezioni singole contenenti
2 mascherine, 1 sup. e 1 inf.

codici e tipo
50 14301 Menta
50 14300 Melon

Six Pack Patient Kit
contiene
60 - Mascherine Superiori
60 - Mascherine Inferiori
in confezioni singole contenenti
2 mascherine, 1 sup. e 1 inf.

codici e tipo
50 14311 Menta
50 14310 Melon

Conservabilità: 12 mesi

 **ULTRADENT**
PRODUCTS, INC.



Importatore e Distributore Esclusivo

Dr Riccardo Ilic spa

Import-export dental & general medical supplies

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2000



Sede
20135 **Milano** Viale Umbria 19a
tel + 39 02 55 016 500
fax + 39 02 55 016 646

Filiale
00198 **Roma** Viale R. Margherita 279b
tel + 39 06 44 033 50
fax + 39 06 44 033 48

Ordini da tutta Italia
numero verde: 800 821 040
fax verde: 800 342 893

Ordini online
www.ilic.it
info@ilic.it

